

Aspect

Reiniger/Aufbewahrungsmittel
**Das wirksame Pflegesystem
für formstabile Linsen**



Aspect Reiniger

Teilabrasiver Oberflächenreiniger.

Aspect Aufbewahrungslösung

Aufbewahrungsmittel, das zum Spülen und zur Aufbewahrung der Linsen nach der Reinigung mit dem Reiniger verwendet wird.

Weshalb ist das Pflegesystem so wirksam für formstabile Linsen ?

🔴 Silica-Suspension mit hoher Ausschwemmkraft von Ablagerungen

Die Silica-Suspension von Aspect Reiniger bewirkt, dass die Reibeaktivität eine außerordentliche Ausschwemm- und Reinigungskraft besitzt und Lipid- und Proteinablagerungen somit entfernt werden.

🔴 Aufbewahrungsmittel zur Aufbewahrung, Befeuchtung und zum Spülen der Linsen

Das Aufbewahrungsmittel besitzt sowohl eine befeuchtende als auch eine desinfizierende Wirkung. Es dient zum Spülen der Linsen und zu deren Aufbewahrung während der Nacht nach der Reinigung.

Zusammensetzung von Aspect Oberflächenreiniger

Natriumlaurylathersulfat, Silica-Gel als solider Reiniger in einer Suspension, Dinatriumedetat 0,1%, Polyhexamethylen-Biguanid 0,001% in einem gepufferten Polymerträger.

Zusammensetzung von Aspect Aufbewahrungslösung

Hydroxypropylmethylcellulose, Poloxamer, Dinatriumedetat 0,1% und Polyhexamethylen-Biguanid 0,0004% in einem gepufferten, isotonsichen Polymerträger.

Sonstige Anwendungsgebiete


🔴 Fettiges Auge

Träger harter Kontaktlinsen sollten einen Reiniger mit Isopropylalkohol und eine spezielle Aufbewahrungslösung verwenden.

WIRKMECHANISMUS DES REINIGERS

Physische Ausschwemmung

- 1_Poröser Feststoffpartikel im Reiniger
- 2_Tensidpartikel

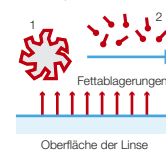

Lösung

- 3_Mizelle (gelöst)



Absorption

