

Premium All in One Lösung mit natürlichen Inhaltsstoffen

Zum Reinigen, Desinfizieren,
Aufbewahren, Abspülen und Benetzen
aller weichen Kontaktlinsen.
Entfernt Proteine.



Natürlich und schonend

Überragender Komfort durch eine
Wirkstoffkombination aus der
Natur:

- **Hyaluron** für optimalen Augenschutz und lang anhaltende Benetzung
- **HEC** (Zellulose) für ein sanftes Gefühl beim Aufsetzen der Linse
- **Echinacea Stammzellen** und **Sonnenblumen Lezithin** spenden Feuchtigkeit, beruhigen und schützen die Hornhaut



Wirksame Reinigung und Desinfektion

Für empfindliche Augen geeignet.

Anwendung



1. Hände waschen

Bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren, waschen Sie die Hände sorgfältig und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch ab.



2. Manuelle Reinigung

a. Nehmen Sie eine Kontaktlinse vom Auge und legen Sie diese auf Ihre Handinnenfläche. Geben Sie einige Tropfen **BIOcare** auf jede Seite der Kontaktlinse.



b. Reiben Sie sie vorsichtig mit kreisenden Bewegungen einige Sekunden. Spülen Sie die Kontaktlinsen nochmals gründlich mit **BIOcare** ab.



3. Behälter befüllen

Legen Sie die Kontaktlinse in den Linsenbehälter und füllen Sie diesen mit **BIOcare** auf.



4. Desinfektion und Aufbewahrung

Bewahren Sie die Linsen mindestens 4 Std. oder über Nacht in der Lösung auf. Bevor Sie die Kontaktlinsen aufsetzen, spülen Sie diese noch einmal mit **BIOcare** ab.

TIPP: Behälterpflege

Die gebrauchte Lösung aus dem Behälter entleeren. Den Behälter mit **BIOcare** spülen und danach trocknen lassen. Zum Ausspülen niemals Leitungswasser verwenden!