

KOMBI H Kombilösung

Zum Desinfizieren, Reinigen, Proteinentfernen, Nachbenetzen und Spülen.

Maximale Befeuchtung

Längerer Komfort

Für weiche Kontaktlinsen, inclusive Silikonhydrogellinsen

Durch das enthaltene Polaxamer und Natriumhyaluronat hält diese Kombilösung Ihre Kontaktlinsen sauber und verleiht Ihnen einen besonderen Tragekomfort. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Entfernung von Proteinablagerungen auf den Kontaktlinsen begünstigt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Waschen Sie die Hände vor den Berühren der Kontaktlinsen. gründlich
- Nehmen Sie eine der Kontaktlinsen aus dem Auge und spülen Sie die Linse einige Sekunden lang mit KOMBI H Kombilösung ab.
- Bringen Sie 3-4 Tropfen KOMBI H Lösung auf die Kontaktlinsen auf und reiben Sie sie etwa 20 Sekunden vorsichtig ab.
- Geben Sie eine ausreichende Menge KOMBI H Kombilösung in den Aufbewahrungsbehälter, so dass die Linse komplett von der Flüssigkeit bedeckt wird und legen Sie die abgespülte Linse hinein.
- Nehmen Sie die zweite Kontaktlinse aus dem Auge und wiederholen Sie die gleichen Schritte wie bei der ersten Linse.
- Belassen Sie die Kontaktlinsen zur Reinigung und Desinfektion über Nacht oder wenigstens 6 Stunden im geschlossenen Aufbewahrungsbehälter.
- Bevor Sie die Kontaktlinsen wieder einsetzen, spülen Sie die Linsen einige Sekunden lang mit KOMBI H Lösung ab.

 Disop
Avda. Valdelaparra, 31-A.
28108 Madrid. España

WÖCHENTLICHE ENZYMREINIGUNG:

KOMBI H entfernt automatisch das auf der Linse abgelagerte Eiweiß, so dass sich eine wöchentliche Enzymreinigung erübrigt. Allerdings kann bei starker Verschmutzung der Linsen dennoch eine Reinigung mit Enzymtabletten nötig sein.

WICHTIGE HINWEISE:

- Verwenden Sie stets frische Lösung. Schütten Sie die vom Vortag im Linsenbehälter verbliebene Lösung weg.
- Bewahren Sie die Flasche gut verschlossen auf und vermeiden Sie Berührungen mit der Tropfspitze.
- Kontrollieren Sie vor der ersten Verwendung des Produktes, ob der Verschluss intakt ist. Die Flasche ist nach erstmaligem Öffnen 90 Tage haltbar.
- An einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.
- Personen mit bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe sollten das Produkt nicht benutzen.
- Im Falle einer andauernden Reizung nehmen Sie die Kontaktlinsen ab und benutzen Sie das Produkt nicht weiter. Konsultieren Sie Ihren Kontaktlinsen Anpasser.
- Die Kontaktlinsen können maximal 30 Tage im geschlossenen Aufbewahrungsbehälter aufbewahrt werden.

ZUSAMMENSETZUNG:

Natriumchlorid, Borsäure, Natriumtetraborat, Natriumcitrat, Polaxamer 407, Hyaluronsäure, Dinatriumedetat 0,02% und Polyhexamethylenbiguanid 0,0001% in gereinigtem Wasser.

Vertrieb:
SWAV Service GmbH
Birkenweg 6
67346 Speyer

EAN:
8 435080 003832

STERILE A

CE 0318

5°C-30°C

