

PROLOGIS SEPT – Gebrauchsanweisung

Bitte diese Gebrauchsanweisung genau durchlesen und für die spätere Verwendung gut aufbewahren. Ihre PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung desinfiziert, entfernt Proteine und dient zur Aufbewahrung aller weichen Kontaktlinsen, einschließlich Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen.

WARNUNGEN!



1 Verwenden Sie ausschließlich den beigefügten speziellen Kontaktlinsenbehälter mit dem Katalysator für PROLOGIS SEPT. VERWENDEN SIE KEINE ANDEREN KONTAKTLINSENBEHÄLTER.



2 Geben Sie PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung NIEMALS direkt in das Auge. Setzen Sie die Linsen NICHT auf das Auge, bevor eine komplette Neutralisation erfolgt ist (mindestens 6 Stunden).



3 Spülen Sie Ihre Linsen nicht direkt vor dem Aufsetzen mit PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung ab. Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen abspülen möchten, benutzen Sie eine sterile Kochsalzlösung.

GEBRAUCHSANLEITUNG



1. Waschen und trocknen Sie immer Ihre Hände, bevor Sie Ihre Linsen berühren und nachdem Sie PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung verwendet haben.



2. Stellen Sie sicher, dass der spezielle Kontaktlinsenbehälter die Neutralisierungsscheibe enthält.



3. Legen Sie Ihre linke und Ihre rechte Kontaktlinse auf die jeweiligen Kuppeln in den entsprechenden Körbchen (links und rechts). Schließen Sie die Körbchen und passen Sie dabei auf, die Kontaktlinsen nicht einzuklemmen.



4. Halten Sie den Deckel des Linsenbehälters und spülen Sie die Linsen jeweils 5 Sekunden lang über dem Wasch-/Spülbecken mit PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung ab.



5. Füllen Sie den Behälter bis zur Linie mit PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung und drehen Sie den Deckel zu. Drehen Sie den Behälter nicht um und schütteln Sie ihn nicht.



6. Nach einer Einwirkzeit von 6 Stunden sind Ihre Kontaktlinsen wieder tragefertig.



7. Wenn Sie die Kontaktlinsen aus den Körbchen genommen haben, schütten Sie die restliche Lösung aus dem Aufbewahrungsbehälter weg, spülen Sie den Behälter über einem Wasch-/Spülbecken mit PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung aus und lassen Sie den Behälter offen an der Luft trocknen.

Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen nicht direkt nach der Desinfektion/Neutralisation tragen möchten, wiederholen Sie diese oben genannten Schritte nach 24 Stunden und vor dem Aufsetzen Ihrer Kontaktlinsen.

Wenn Sie zusätzlich einen täglichen Reiniger verwenden, achten Sie darauf, die Kontaktlinsen gründlich mit Kochsalzlösung abzuspülen, bevor Sie sie in PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung geben.

INHALT:

Sterile und gepufferte 3%ige Hydrogenperoxidlösung mit Phosphonsäurestabilisator, Natriumchlorid und Phosphatpuffern.

Gründe für die Nichtanwendung: Bei Allergie gegen einen der Bestandteile darf dieses Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtentsorgung der Lösung aus dem Kontaktlinsenbehälter nach jeder Benutzung oder der Einsatz von Wasser zur Pflege der Kontaktlinsen kann zur Verunreinigung führen, was wiederum zu Verletzungen am Auge und möglicherweise zum Sehverlust führen kann. Weitere wichtige Sicherheitshinweise entnehmen Sie den beiliegenden Anweisungen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Halten Sie sich stets an die Gebrauchsanweisung. Das Nichtbefolgen der Anweisungen kann zum Sehverlust führen bzw. Brennen und Stechen herbeiführen.
- PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung ist **KEINE** Kombilösung.
- Bringen Sie PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung oder Ihre Kontaktlinsen niemals auf das Auge, bevor eine komplette Neutralisation erfolgt ist (mindestens 6 Stunden).
- Spülen Sie Ihre Linsen vor dem Aufsetzen nicht mit PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung ab. Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen abspülen möchten, benutzen Sie eine sterile Kochsalzlösung.
- Waschen und trocknen Sie immer Ihre Hände, bevor Sie Ihre Linsen berühren.
- Verwenden Sie für Ihre Kontaktlinsen und Ihren Kontaktlinsenbehälter kein Leitungswasser, abgefülltes Wasser und keinen Speichel.
- Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion der Kontaktlinsen nur frische Lösung.
- Wechseln Sie Lösung, Kontaktlinsen und Kontaktlinsenbehälter immer gemäß den Anweisungen.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass die Flaschenspitze niemals irgendeine Oberfläche berührt. Schrauben Sie nach der Verwendung den Deckel wieder auf.
- Nicht für Hitzedesinfektion (thermische Desinfektion) geeignet.
- Suchen Sie regelmäßig Ihren Kontaktlinsenspezialisten auf.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Lösung im Kontaktlinsenbehälter unbedingt nach jeder Verwendung entsorgen.
- Flasche bei Nichtverwendung gut verschließen.
- Nach Ablauf des Mindestverwendbarkeitsdatums nicht mehr verwenden (auf der Verpackung und der Flasche zu finden).
- Entsorgen Sie die Flasche und den Kontaktlinsenbehälter 90 Tage nach Anbruch bzw. nach 35 Verwendungen, je nachdem, was zuerst eintritt.
- Bei Raumtemperatur lagern.
- Bei beschädigtem oder fehlendem Schutzsiegel Flasche nicht verwenden.
- Benutzen Sie die Lösung nur mit dem speziellen PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung-Kontaktlinsenbehälter.
- Drehen Sie den Behälter nicht um und schütteln Sie ihn nicht, weil dadurch unneutralisierte Lösung auf dem Deckel verbleiben könnte.
- Vermeiden Sie den Kontakt von PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung mit Stoffen.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

Lieferform: PROLOGIS SEPT-Peroxidlösung ist in sterilen, 360 ml fassenden Plastikflaschen erhältlich und mit einem neuen Kontaktlinsenbehälter ausgestattet. Flaschen und Verpackung sind mit einer Chargennummer und einem Mindestverwendbarkeitsdatum versehen.

Hergestellt in Italien
Fabriqué en Italie
Prodotto in Italia



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman St.
Rochester, NY 14609, USA



Vertrieb:
Prologis GmbH & Co. KG
Hohe Koppel 7
25842 Langenhorn
www.prologis-gmbh.de

Bausch & Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91 V383, Ireland



CE 0050

STERILE A



51083829-03
PIDACH01